



ABSORPČNÍ PODLOŽKY

Návod k použití

Podložka k dodatečné ochraně lůžka je určena k opakovanému použití, po vyprání.
Je vhodná pro domácí i ústavní použití.

Proč používat podložku?

Podložka tvoří nepromokavou ochranu lůžka a je šetrná k uživateli. Vrchní vrstva z jemného plyše zajišťuje měkký a příjemný dotyk s pokožkou. Jedinečná konstrukce textilie zajišťuje, že nežádoucí tekutina je rychle odvedena do středních vrstev podložky, které ji zadrží a brání jejímu zpětnému pronikání do vrchní vrstvy, která je v kontaktu s tělem. Tekutina se z podložky odstraní při jejím následujícím praní.

Zaoblené rohy podložky snižují riziko opotřebení při praní v pračce a sušení v bubnu a tím prodlužují její životnost. Varianta výrobku se záložkami umožňuje pevnou fixaci podložky na lůžku. Varianta výrobku s madly umožňuje snadnější manipulaci při polohování na lůžku.

Podložka není určena a nesmí být použita na přenášení a zvedání osob! Je určena pouze k polohování na lůžku!

4L

Inkontinenční podložka čtyřvrstvá - 100-200 ml/4 hodiny.

5L

Inkontinenční podložka pětivrstvá - 200-300 i více ml/4 hodiny.

Složení:

Podložka je vyrobena z vícevrstvé laminované textilie spojené plošným prošitím a laminací. Pětivrstvá tex-

tilie o plošné hmotnosti 515 g/m², čtyřvrstvá textilie o plošné hmotnosti 440 g/m².

Vrchní vrstva:

osnovní plyšová pletenina ze 100 % polyesterových vláken MICRO

Střední/savá vrstva:

rouno/plst' ze 100 % polyesterových vláken
(1x/čtyřvrstvá, 2x/pětivrstvá)

Spodní vrstva:

osnovní pletenina ze 100 % polyesterových vláken, s nalamino-
vanou polyuretanovou membránou, tvoří nepromokavou
bariéru.

Jak postupovat při použití?

Podložku položte na lůžko uživatele, do exponovaného místa, plyšovou vrstvou nahoru (směrem k tělu) a nepromokavou vrstvou směrem dolů (k matracím lůžka).

U varianty výrobku se záložkami zasuňte záložky pod matraci (podložka se tím pevně fixuje na místě). Po každém použití (nasycení) středních vrstev tekutinou podložku vyperte.

Postup praní:

Při teplotě do 95 °C, běžnými pracími prostředky (program s předepírkou, meziodstředováním a odstředováním). Životnost podložky je cca 300 cyklů praní a sušení.

Upozornění: Nedoporučuje se používat prací prostředky s bělicím účinkem, podložku bělit, chemicky čistit, používat aviváž a žehlit (poškodilo by funkční vlastnosti výrobku).



ABSORPČNÍ PODLOŽKY

Kontraindikace:

Při použití absorpční podložky nebyly popsány žádné vedlejší účinky typu alergií, zvýšení bolestivosti tvorbou proleženin, ani žádné další kontraindikace. Lehké kožní podráždění (svědění) u precitlivělých osob, není na závadu.

Ekologická likvidace výrobku:

Po skončení životnosti výrobek vyperte a likvidujte do tříděného odpadu. S použitým (nevypraným výrobkem) je třeba nakládat jako s mikrobiologicky kontaminovaným materiálem!

Skladování:



Skladujte v suchu, při teplotě 5 -25 °C, nevystavujte přímému slunečnímu záření.

LOT 20140906



CLINITEX s.r.o.
Vratimovská 672/42
Ostrava - Kunčičky
718 00
www.clinitex.cz

Absorpční podložka 5L

REF OO3 ABSO5L
100% POLYESTER
MEMBRANA-POLYURETAN
HMOTNOST 515 gr/qm
300x PRÁNÍ A SUŠENÍ

INENÍ URČENA A NESMÍ
BÝT POUŽITA NA
PŘENÁŠENÍ A ZVEDÁNÍ
OSOBI JE URČENA POUZE K
POLOHOVÁNÍ NA
LŮŽKU! NEPOUŽÍVAT AVIVÁŽ!



LOT 20140906

Význam symbolů na etiketě:

	Praní při teplotě do 95 °C		Výrobce
	Zákaz bělení		Datum výroby
	Zákaz žehlení		Čti návod
	Zákaz chemického čištění	REF	Katalogové číslo
	Sušení v bubnu, nižší teplota sušení		Skladovat v suchu
5 Layers			Chránit pře sluncem
4 Layers			Omezení teploty
NEPOUŽÍVAT AVIVÁŽ			Obalové symboly, likvidace použití



Výrobce (a distributor):

CLINITEX S.R.O., VRATIMOVSKÁ 672/42
718 00 OSTRAVA – KUNČIČKY, ČESKÁ REPUBLIKA